


Краткое руководство по TC-client

Основное окно программы

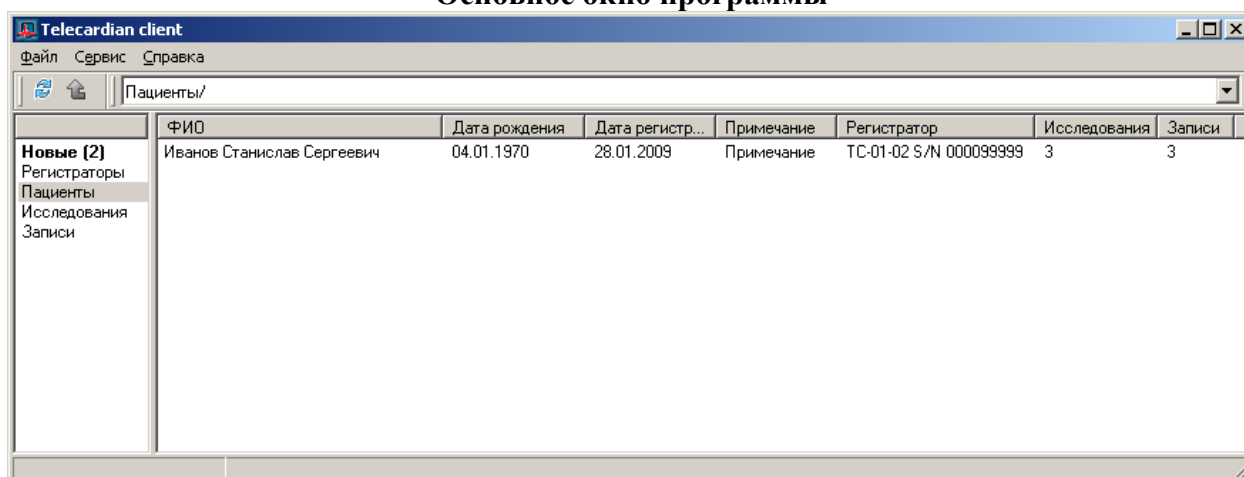

Пациенты/ - Текущее положение.

– Функциональные клавиши.

– Обновить – запросить новые данные с сервера

– Вернуться в предыдущее положение.

Файл Сервис Справка - основное меню.

Рабочая область программы.

ФИО	Дата рождения	Дата регистр...	Примечание	Регистратор	Исследования	Записи
Иванов Станислав Сергеевич	04.01.1970	28.01.2009	Примечание	TC-01-02 S/N 000099999	3	3


Здесь отображаются Пациенты, Регистратор, Исследования, Записи, в зависимости от текущего положения.

Сортировка

Для сортировки таблицы нажмите на соответствующем заглавии столбца. Повторное нажатие на то же заглавие отсортирует таблицу в обратном порядке.

ФИО	Дата рождения	Дата регистра...	Примечание
-----	---------------	------------------	------------

Левое меню навигации.

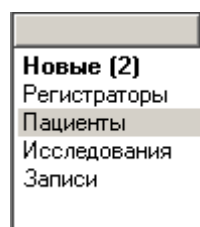

Служит для быстрой навигации.

Новые – вывод всех не просмотренных записей.

Регистраторы - зарегистрированные регистраторы.

Пациенты - вывод добавленных пациентов

Исследования – вывод всех исследований.

Записи – вывод всех записей.

Первый запуск

После первого запуска отображается окно входа в систему

Введите пароль

Вход в систему

Пользователь
login

Пароль
xxxxxxxxxx

Сохранить пароль

Синхронизировать при запуске


Перезагрузить всю базу данных

[Настройки подключения](#)

Ок Отмена


Если вы используете **proxy server** для подключения в интернет, внесите соответствующие настройки, кликнув на "Настройки подключения" (Далее будет доступно через основное меню Сервис=>Настройки).

В дальнейшем это оно доступно через основное меню *Файл=>Подключится*

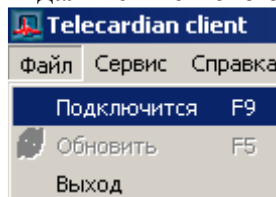

Или по горячей клавише F9.

Раздел пациенты

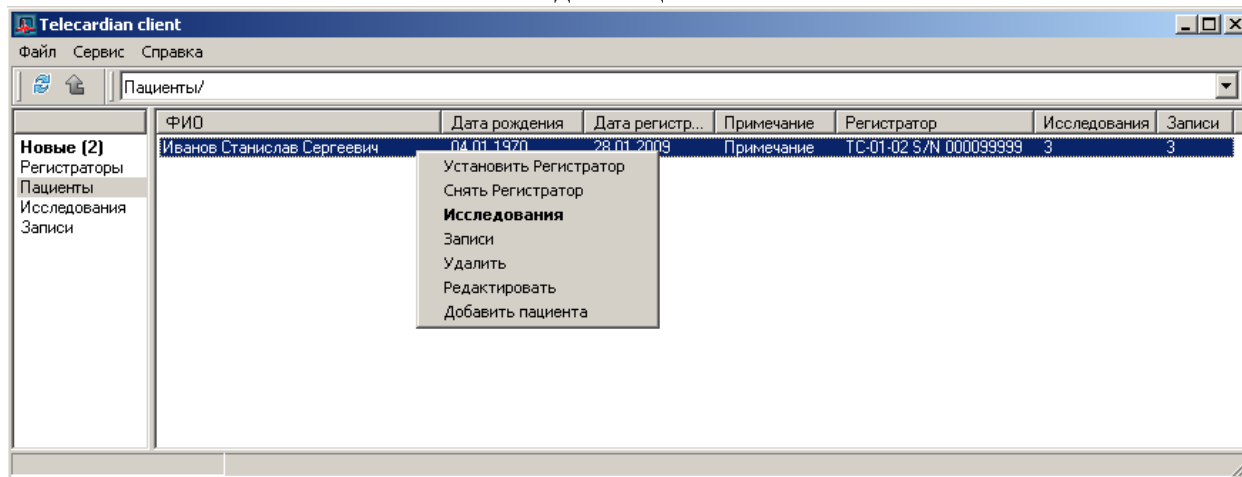


Для произведения операций над пациентом нажмите правой кнопкой на выбранном пациенте.

Операция, выделенная жирным шрифтом, так же выполняется по **двойному клику** мыши. Любые операции изменяющие базу данных можно производить только после подключения к серверу (Файл=>Подключится или F9). Если подключение к серверу не было произведено, то кнопка обновить, не активна

Операции над пациентами


Установка регистратора – установка/изменение текущего регистратора

Выберите регистратор из выпадающего списка и нажмите "Ок". Если регистратор уже установлен на пациенте, то в скобках отображается его ФИО. При выборе уже установленного регистратора он будет автоматически снят, и присвоен новому пациенту.

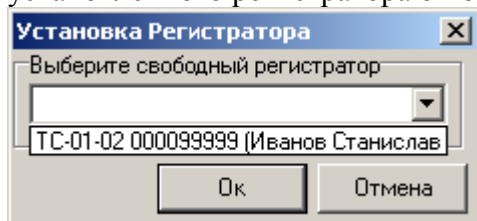


Снять регистратор – снять регистратор с пациента.

Исследования – просмотр исследований только выбранного пациента. Текущий путь меняется на .

Для возврата к пациентам нажмите 

Записи – просмотр всех записей пациента. Текущий путь меняется на .

Для возврата к пациентам нажмите 

Удалить – удалить пациента и все его исследования и записи. Если на пациенте установлен регистратор, то он будет автоматически снят.

Редактировать – редактировать данные выбранного пациента. Отображается окно

После внесения изменений нажмите "Ок".

Добавить пациента – добавить нового пациента.

Поля, выделенные жирным шрифтом, обязательны для заполнения.
Для добавления пациента нажмите "Ок".

Раздел исследования

	Пациент	Регистратор	Дата открытия	Дата закрытия	Всего записей	Новых записей	Размер
Новые (3)	Иванов Станислав Сергеевич	ТС-01-02 S/N000099999	14.07.2009		0	0	0
Регистраторы	Иванов Станислав Сергеевич	ТС-01-02 S/N000099999	04.06.2009	21.05.2009	2	2	77152
Пациенты	Иванов Станислав Сергеевич	ТС-01-02 S/N000099999	16.02.2009	16.02.2009	1	1	11232
Исследования							
Записи							

Для просмотра записей исследования дважды щелкните на выбранном исследовании или выберите в сплывающем меню пункт "Записи".

Раздел записи

	Пациент	Регистрация	Прием - Передача	Длительность	Размер	Заключение
Новые (2)	Иванов Станислав Сергеевич	07.05.2009 11:11:00	07.05.2009 11:11:00	0	38432	
Регистраторы	Иванов Станислав Сергеевич	29.04.2009 21:4...	29.04.2009 21:4...	0	38720	Диагноз
Пациенты						
Исследования						
Записи						

Жирным выделены не просмотренные записи.

Кликните на запись, что бы ее просмотреть.




Основные операции при просмотре записи



- Изменение масштаба по времени
- измерение амплитуды
- изменение масштаба по амплитуде
- включение фильтра 50 Гц
- восстановление изолинии
- 50 25 12.5 выбор стандартного масштаба времени времени
- измерение времени.

Над записями доступны следующие операции:

- Отметить не просмотренным
- Редактировать заключение
- Удалить
- Печать
- Отметить все просмотренными

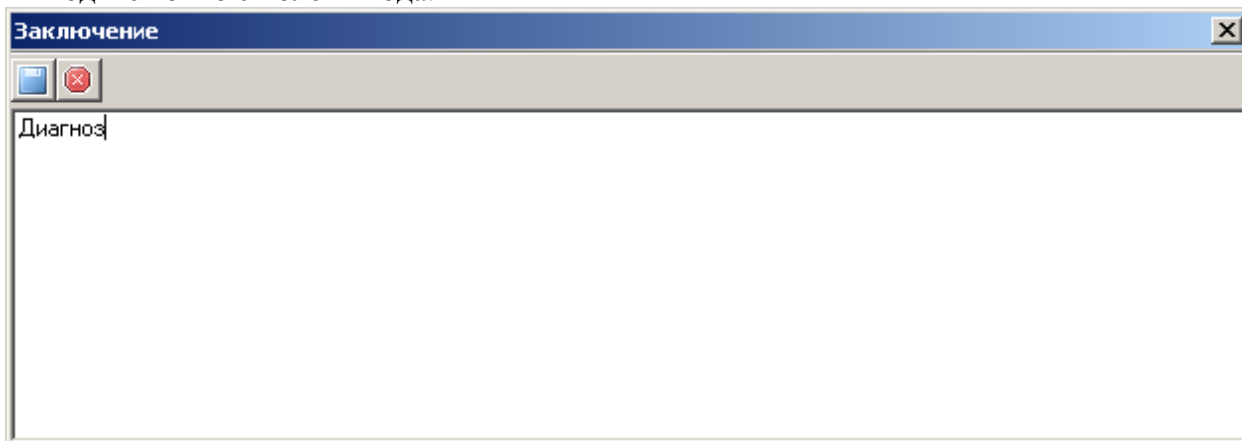Редактировать заключение.
Выводится окно с полем ввода.




Для сохранения изменений нажмите . Для отмены .

Заключение выводится в отчете при печати.

Печать

После выбора "Печать" отображается окно предварительного просмотра. Ненужные интервалы можно удалить, выбрав их мышкой и нажав "Delete" на клавиатуре или выбрав соответствующий пункт во всплывающем меню. Выбранный интервал обводится рамкой.

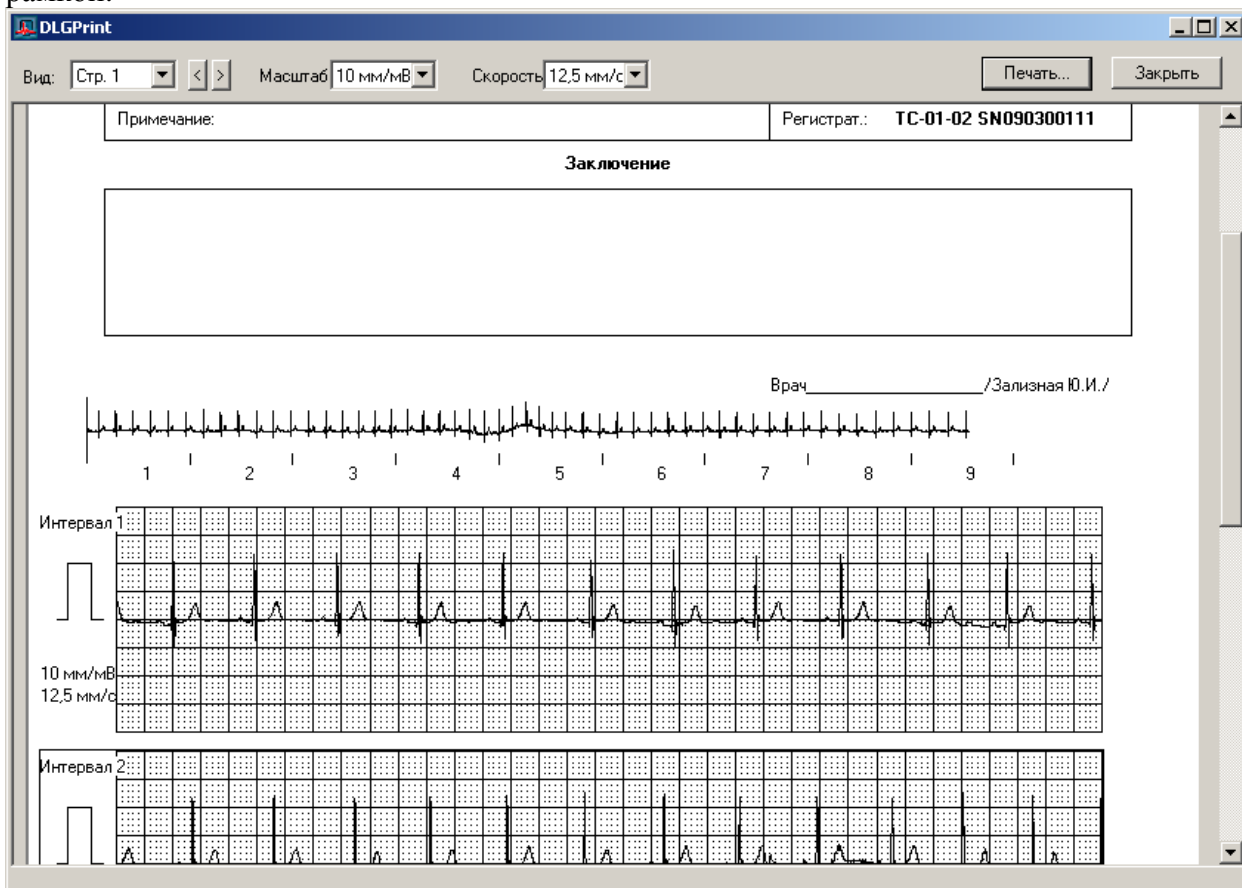

Для печати записи нажмите кнопку "Печать" в появившемся окне выберите принтер для печати и нажмите "Ок".